

Starkey Hearing Technologies Charger




Der Standard Charger fungiert als tragbare Ladestation, Trockenset und Behälter für wiederaufladbare Standard-Lithium-Ionen-Hörsysteme, einschließlich RIC R und BTE R. Der Im-Ohr Charger fungiert als tragbare Ladestation und als Behälter für wiederaufladbare Im-Ohr-Hörsysteme. Beide Ladestationen sind mit LED-Leuchten ausgestattet um den Ladestatus sowohl für die Hörsysteme als auch für den integrierten Akku der Ladestation anzuzeigen.

LED-Anzeigen für den Ladezustand der Hörsysteme

An der Vorderseite der Ladestation befinden sich zwei LED-Anzeigen, die über den Ladezustand der Hörsysteme informieren.

- 1 Wenn die Hörsysteme in die Ladestation eingesetzt werden, leuchten die LEDs an der Vorderseite grün auf, um den Ladevorgang anzuzeigen.
- 2 Wenn die Hörsysteme aufgeladen sind, leuchten die LEDs an der Vorderseite dauerhaft grün, um die vollständige Ladung anzuzeigen.
- 3 Bei Ladeproblemen oder einer Störung der Hörsysteme blinken die LEDs an der Vorderseite rot.

HINWEIS: Im Falle einer Störung die Hörsysteme aus der Ladestation nehmen, warten, bis die LEDs ausgehen, und die Hörsysteme wieder in die Ladestation einsetzen. Wenn die Störung anhält, wenden Sie sich bitte an Ihren Hörakustiker.

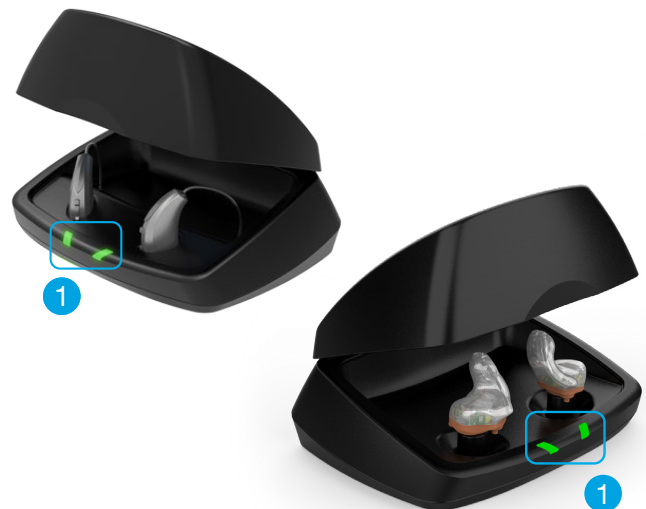

LED-Anzeigen für den integrierten Akku

An der Rückseite der Ladestation befinden sich vier LED-Anzeigen, die über den Ladezustand des integrierten Akkus informieren. Der integrierte Akku ermöglicht das Aufladen der Hörsysteme unabhängig von einer Stromversorgung für die Ladestation.

- Vier grün leuchtende LEDs zeigen an, dass die Ladestation mit einer Stromversorgung verbunden und vollständig aufgeladen ist.
HINWEIS: *Beim Aufladen der Hörsysteme ohne Netz-Anschluss gehen die LEDs an der Rückseite nach 10 Sekunden aus, um den Akku zu schonen.*
- Vier leuchtende LEDs zeigen an, dass der Akku mehr als 75 % geladen ist.
- Drei leuchtende LEDs zeigen an, dass der Akku weniger als 75 % geladen ist.
- Zwei leuchtende LEDs zeigen an, dass der Akku weniger als 50 % geladen ist.
- Eine leuchtende LED zeigt an, dass der Akku weniger als 25% geladen ist.
- Eine blinkende LED zeigt einen niedrigen Ladestand an. Die Ladestation muss an die Stromversorgung angeschlossen werden, um den integrierten Akku aufzuladen.
HINWEIS: *Bei Anschluss an eine Stromversorgung werden Hörsysteme und integrierter Akku gleichzeitig geladen.*



Verwendung

- Wenn die Ladestation nicht eingesteckt ist und der integrierte Akku leer ist, schalten sich die Hörsysteme in der Ladestation AN.
- Die Hörgeräte können gefahrlos in der Ladestation belassen werden, da sie nicht überladen werden.
- Die Hörgeräte werden bei offenem und bei geschlossenem Deckel geladen.
- Hörgeräte können über den integrierten Akku der Ladestation bis zu dreimal aufgeladen werden, ohne an eine Stromquelle angeschlossen zu sein.
- Der integrierte Akku sowohl im Standard Charger als auch im Im-Ohr Charger ist in 2,5 Stunden vollständig aufgeladen. Standard- und Im-Ohr Hörsysteme werden in 3,5 Stunden vollständig aufgeladen.
- Hörsysteme werden beim Entfernen aus der Ladestation automatisch eingeschaltet und beim Einsetzen in die Ladestation ausgeschaltet.

HINWEIS: *Wenn die Ladestation auch zur Trocknung genutzt wird, sollte der Deckel geschlossen bleiben, um die Wirkung der Trockenkapsel zu erhalten.*