


Thrive Hearing Control App

Android Einrichtung

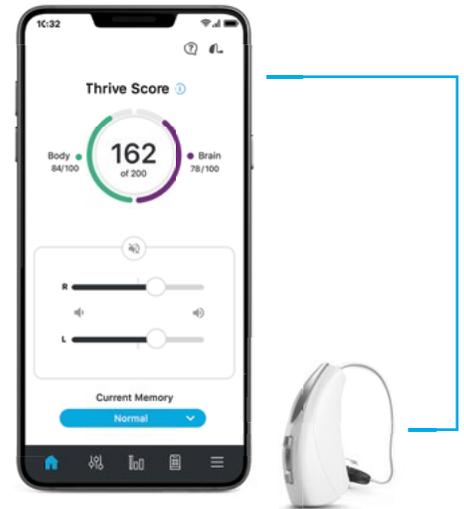

Laden Sie die Thrive Hearing Control App herunter

Sie müssen über ein Google Play Store-Konto verfügen, um die Thrive Hearing Control-App heruntergeladen zu können. Ein Google Play Store-Konto kann unter "Einstellungen"> "Konten" erstellt werden. Wählen Sie ein vorhandenes Konto oder Konto hinzufügen, um ein neues Konto zu erstellen.

- 1 Sobald ein Google Play Store-Konto eingerichtet ist, öffnen Sie den Play Store.
- 2 Suchen Sie nach der Thrive Hearing Control App.
- 3 wählen Sie **Installieren**.




Kopplung und Thrive App Ersteinrichtung

So koppeln Sie Ihre Hörsysteme mit einem Android-Smartphone:

- 1 Starten Sie die Thrive App.
- 2 Die App sucht nach verfügbaren Hörsystemen und zeigt diese an.
- 3 Wählen Sie Ihre Hörsysteme und tippen Sie auf **Verbinden**.

HINWEIS: Die Kopplung kann bei Bedarf auch über das Bluetooth®-Menü des Android-Smartphones abgeschlossen werden.

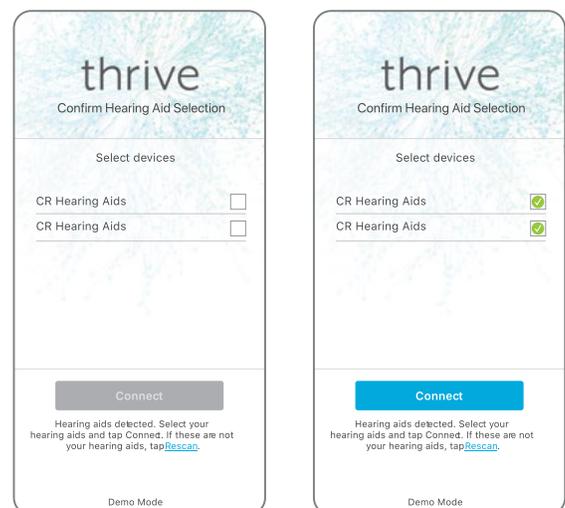


Kopplung und Thrive App Ersteinrichtung (Fortsetzung)




Endnutzer-Lizenzvereinbarung & Datenschutzrichtlinie

Lesen die Vereinbarung und aktivieren Sie die beiden Zustimmungsfelder. Beide Zustimmungsfelder müssen aktiviert sein, um fortzufahren. Klicken Sie auf Akzeptieren.

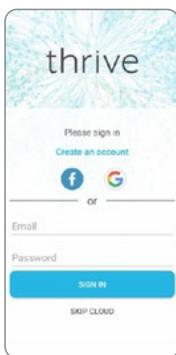

Cloud-Konnektivität

Melden Sie sich mit Facebook, Google an oder erstellen Sie ein eigenes Konto mit einer E-Mail-Adresse und einem Passwort. Mit einer Cloud-Konnektivität können Informationen durch Hearing Care Anywhere, den Sturzalarm und allgemeine App- und Hörgeräteinformationen gesichert und wiederhergestellt werden. Wenn übersprungen, kann die Cloud-Konnektivität jederzeit innerhalb der App eingerichtet werden, indem Sie zum Menü **Weitere Einstellungen** der Thrive-App > **Hearing Care Anywhere** > **Anmelden** gehen.

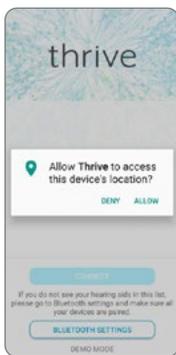

Standortdienste

Wählen Sie Verweigern oder Zulassen. Standortdienste bieten die Möglichkeit, Hörprogramme mit Geotags zu versehen, das automatische Fahrzeugprogramm zu aktivieren, Standortdetails für den Sturzalarm bereitzustellen und die Funktion "Meine Hörgeräte finden" zu verwenden. Standortdienste können unter Android-Einstellungen > Sicherheit & Standort > Standort geändert werden

Geräteeinstellungen

Wählen Sie Einstellungen um festzulegen, wie Ihre Hörsysteme auf das Auto, Telefonanrufe und Audio-Streaming reagieren. Aktivieren oder deaktivieren Sie Funktionen wie Benachrichtigungen, Tippsteuerung, Datalogging und Comfort Boost.



Benachrichtigungen: Durch Aktivieren von Benachrichtigungen kann ein Ton in den Hörsystemen abgespielt werden, wenn ein Anruf eingeht. Drücken Sie die blaue Taste, um eine Vorschau der Benachrichtigungen anzuzeigen.

Tippsteuerung: Schalten Sie die Tippsteuerung ein oder aus. Diese Funktion steuert den Start / Stopp-Stream des Zubehörs, den Edge-Modus und den Thrive Assistant. Stellen Sie die bevorzugte Funktionalität für das rechte und das linke Hörsystem ein, indem Sie auf das Stiftsymbol  tippen. Regeln Sie außerdem die Empfindlichkeit. Nur für AI-Hörsysteme verfügbar.

Fahrzeug: Automatisches Fahrzeugprogramm ein- oder ausschalten. Automatische Hörprogrammänderungen treten auf, wenn in einem Fahrzeug eine Geschwindigkeit von 16 km/h pro Stunde oder mehr erreicht wird. Wählen Sie aus, welches Hörprogramm verwendet wird, indem Sie auf  tippen und das bevorzugte Hörprogramm auswählen.

Comfort Boost: Comfort Boost ist standardmäßig deaktiviert. Tippen Sie auf den Schieberegler, damit das Comfort Boost-Symbol auf dem Startbildschirm angezeigt wird. Das Symbol wird blau hervorgehoben, wenn es aktiviert ist. Comfort Boost bleibt eingeschaltet, bis es manuell ausgeschaltet wird.

Telefon: Schalten Sie das automatische Telefon ein oder aus. Automatische Hörprogrammänderungen treten auf, wenn die Hörgeräte Audiosignale von einem Telefon erkennen. Wählen Sie aus, welches Hörprogramm vom automatischen Telefonmodus verwendet wird, indem Sie auf den bevorzugten Hörprogrammnamen tippen.

Datalog: Schalten Sie das Data Logging ein oder aus. Nach Deaktivierung kann kein Mentaler Fitness-Score generiert werden.

Auto Ein-/Ausschalten: Tippen Sie auf den Schieberegler, um Auto Ein-/Ausschalten zu aktivieren. Durch diese Funktion können die Hörsysteme bei Nichtgebrauch automatisch in den Energiesparmodus wechseln. Nur für AI-Hörsysteme verfügbar.

Thrive Assistant Mic: Tippen Sie auf Hörsystem Mikrofon oder Telefon Mikrofon um die Präferenz auszuwählen, welches Mikrofon für Thrive Assistant verwendet wird. Die Mikrofone des Hörsystems sind die Standardeinstellung.

Thrive Wellness Score Einrichtung

Legen Sie Informationen zur Profil- und Aktivitätsverfolgung fest, um genaue Berechnungen des Thrive Scores sicherzustellen.

- **Profil:** Geben Sie Größe, Gewicht, Geburtsdatum und Geschlecht ein. Informationen können jederzeit über **Weitere Einstellungen > Thrive Score > Profil geändert** werden.
- **Aktivität:** Passen Sie die Aktivitätsziele an, einschließlich Schritte, Übung und Stehen. Informationen können jederzeit über **Weitere Einstellungen > Thrive Score > Aktivitäts-Tracking** geändert werden.

HINWEIS: Direktes Streaming ist nur mit bestimmten Android-Geräten möglich. Bei allen anderen Android-Smartphone-Modellen arbeiten Hörsysteme und das 2,4-GHz-Remote-Mikrofon + zusammen, um Freisprech-Telefongespräche mit binauralem Streaming zu ermöglichen. Audioübertragungen wie Musik, Filme, GPS-Anweisungen und mehr können auch über das Remote Microphone + direkt in die Hörsysteme gestreamt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Remote-Mikrofon + QuickTIP.